

# Инструкция по работе с камерой

В комплект входит камера, антибликовые чехлы и провод. Он подключается через USB-порт или переходник для планшета или смартфона – выбирайте в зависимости от того, чем пользуетесь.

Камера MEGAEYE совместима с любым устройством на Windows, MacOS или Android, а в скором времени выйдет приложение и под iOS. Пользоваться камерой очень просто – выполните всего 2 шага:

1. Скачайте приложение MEGAEYE;
2. Подключите камеру к телефону, планшету или ноутбуку и приступайте к съемке.

На планшете или компьютере вы получите лучшую визуализацию: изображение будет крупнее и четче, чем на экране телефона.

## **Как подключить камеру**

Все зависит от того, каким устройством вы пользуетесь, и от операционной системы, на котором оно работает.

Если вы пользуетесь MacBook: подключите камеру и запустите утилиту Photo Booth, которая есть на вашем устройстве.


Если вы – пользователь ноутбука с ОС Windows: перейдите на сайт [www.imegagen.com](http://www.imegagen.com) и скачайте программу. После установки ее на ноутбук или компьютер подключите камеру и приступайте к съемке видео или фото.

Если вы пользуетесь смартфоном на Android, скачайте в Playmarket приложение MEGAEYE, подключите камеру к телефону, подтвердите запрос на доступ и приступайте к съемке.

Проверьте совместимость со своим устройством на сайте [Imegagen.ru](http://Imegagen.ru)

## Установите приложение «MEGAEYE» на Android


1. Скачиваем и устанавливаем программу MEGAEYE в PlayMarket;
2. Подключаем камеру к microUSB порту устройства.

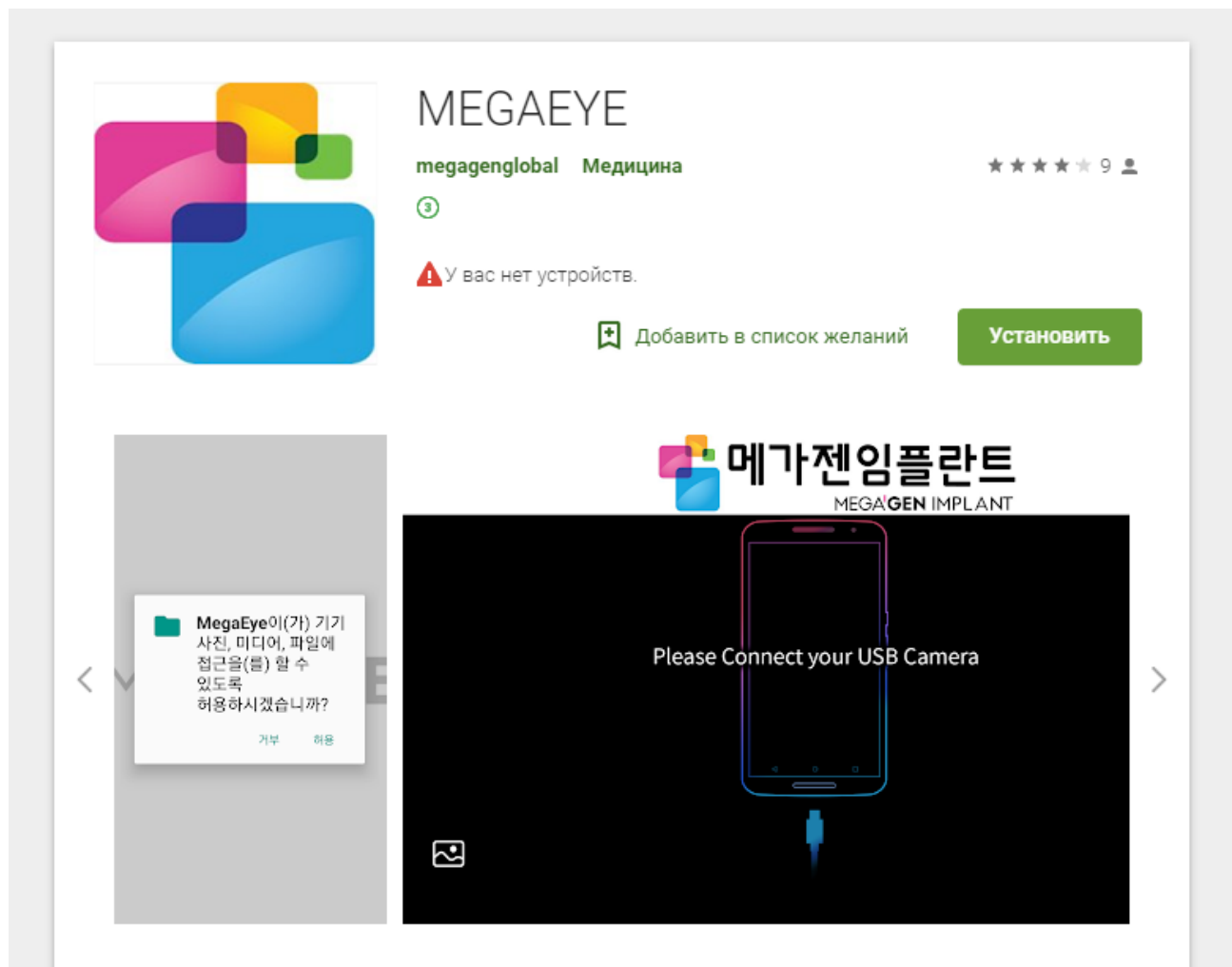

## **При работе на Mac OS**

1. Запускаем программу PhotoBooth;
2. Подключаем камеру через USB-переходник к MacBook;
3. На экране отображается изображение с камеры;
4. Выбираем режим видео;
5. Нажимаем на значок «видеокамера», запись началась;
6. Вторично нажимаем на значок «видеокамера», запись закончилась;
7. Нажимаем на кнопочку «сохранить», видеозапись сохраняется в фотоальбом.

# Установите приложение «MEGAEYE» на Windows 7/8/10

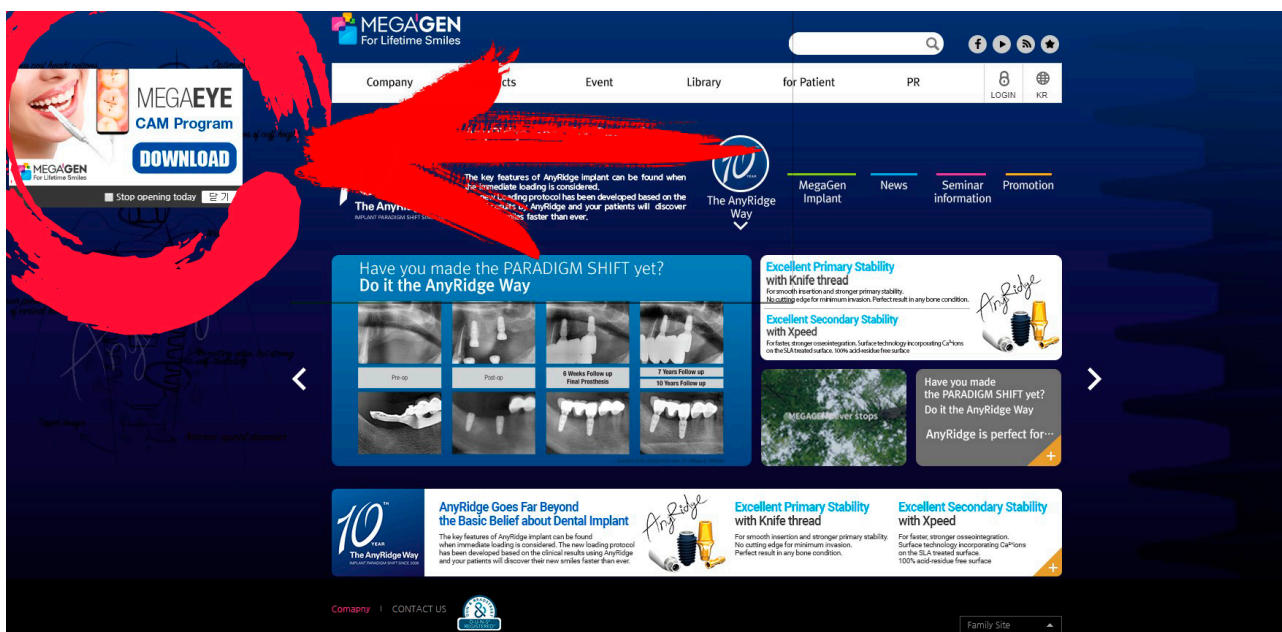

1. Подключаем камеру к компьютеру через USB-переходник;
2. Скачиваем программу архив MEGAEYE с сайта <http://www.imegagen.com/>
3. Распаковываем в любую удобную папку;
4. Запускаем программу MegaEye.exe (для фотографий) MegaEye\_view.exe (для видео)

**ПРИЯТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ!**